

Leitfaden zur Rückführung des Phrozen Sonic XL 4K – Qualified by Dreve



1. Entfernung der Software Lizenz (am PC)

Öffnen der Slicing Software

→ Help / Hilfe Button anklicken

→ Remove License /Lizenz entfernen

→ mit „OK“ bestätigen

2. Reinigung

Harzwanne säubern

Material in Flasche umfüllen

Die Wanne mit Isopropanol reinigen

3. Transportsicherung platzieren

Z-Achse in die Transportsicherung runter fahren

a) Wanne platzieren

b) Schaumstoff über der Wanne platzieren

c) Z-Axis im Druckerdisplay anwählen

d) Über die Pfeiltasten nach unten fahren lassen

(Klicken auf die Zahl ändert die zu fahrende Distanz; ca. 160 mm sind nötig)

4. Griff abmontieren

5. WLAN Dongle entfernen

6. Drucker über das Menü ausschalten

7. Zubehör auf Vollständigkeit prüfen

USB Stick Software (roter Dreve Schlüssel)

WLAN Dongle (weiß)

2x Netzkabel

Trichter (gelb)

Metallspachtel

Kunststoffspachtel

Griff inkl. 2 Schrauben

4x Inbusschlüssel

Gerätekarte

8. Verpackung

a) Bitte die Originalverpackungen des Druckers und Zubehörs zur Rückführung des Phrozen Sonic XL 4K verwenden. Sollte diese nicht mehr vorhanden sein, Ersatzkartonage auf

dentamid.dreve.de/service/geraete-reparieren/ bestellen

b) Zubehörkarton in den Phrozenkarton legen

c) Oberteil des Phrozenkartons aufstülpen und schließen